
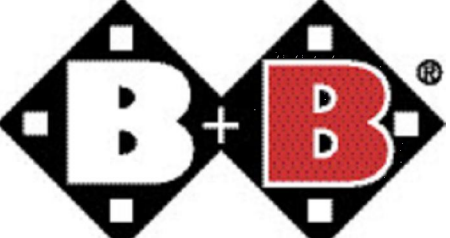
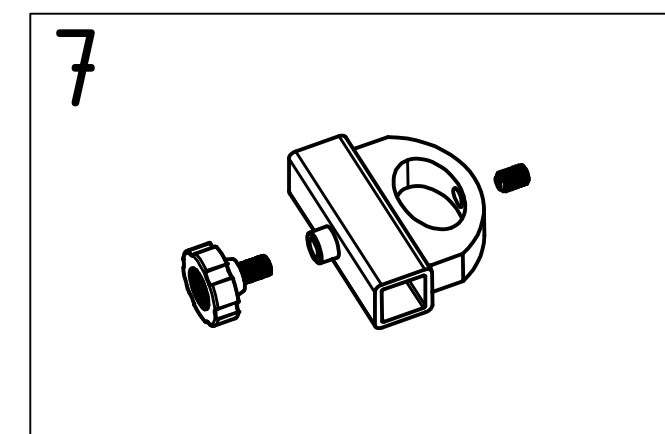
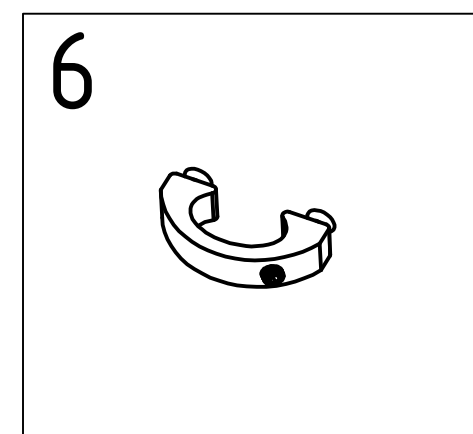
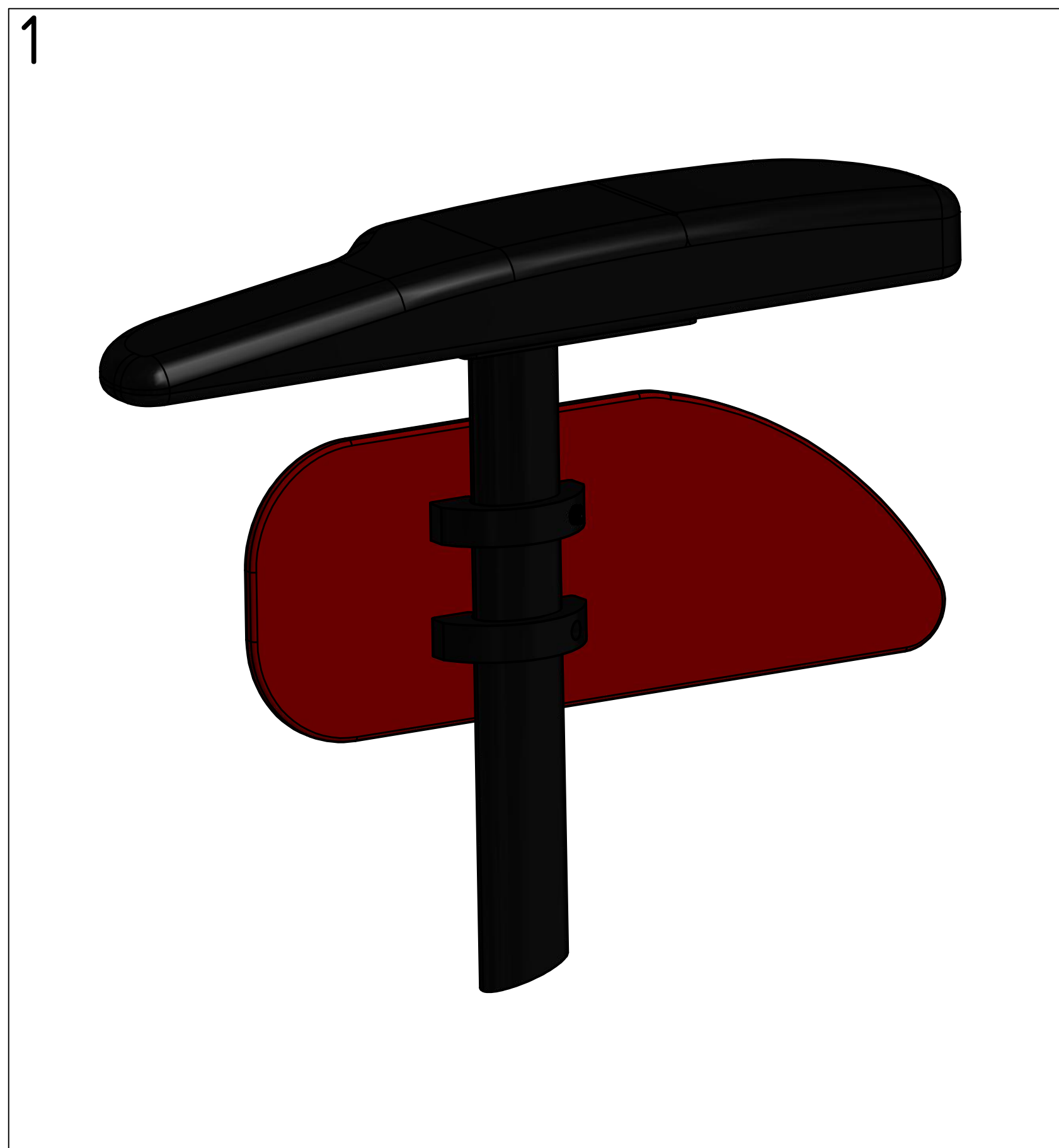
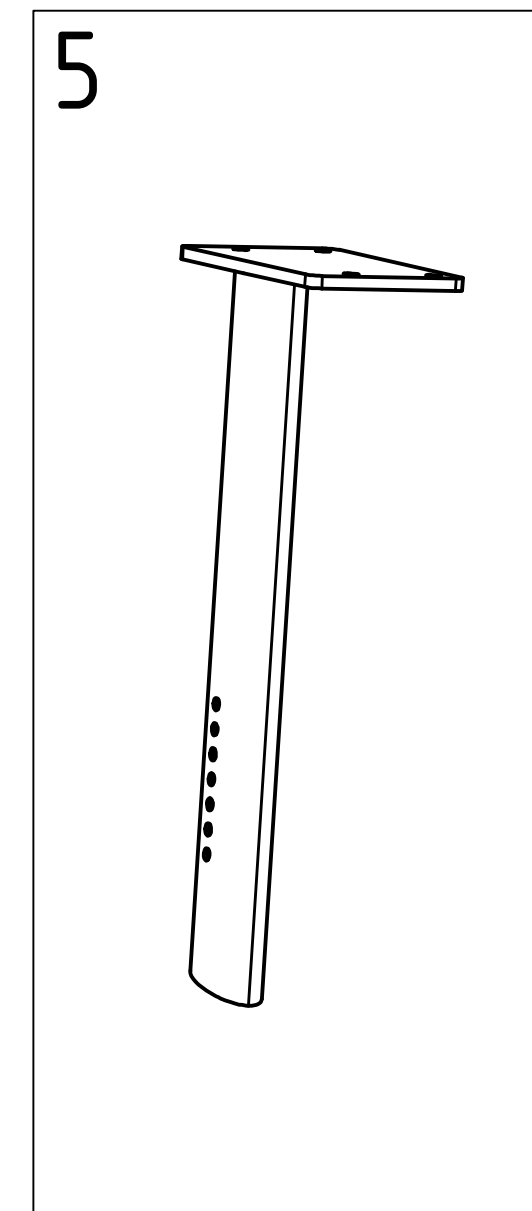
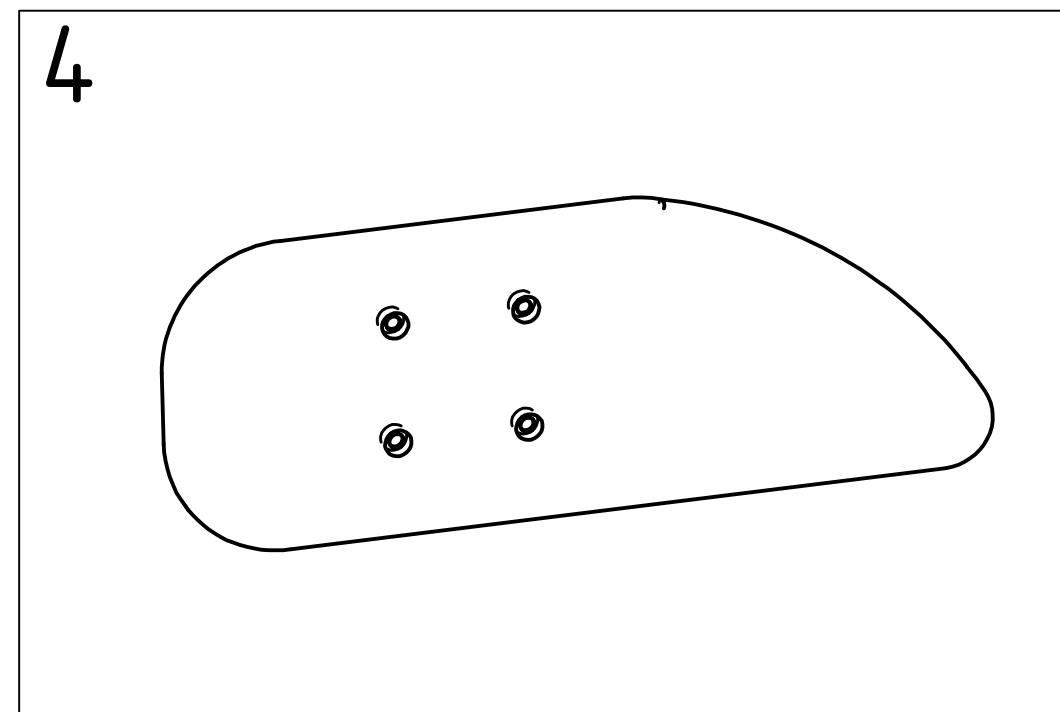
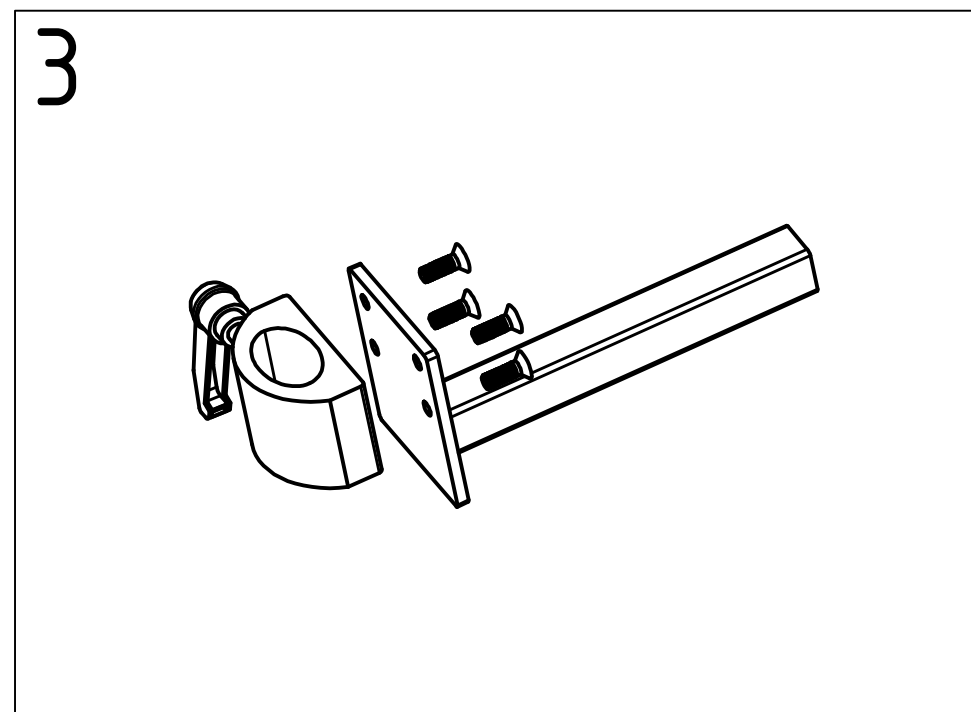


Datum: 30.07.2013	Typ: Terra	Modell: 8350	
S/N			





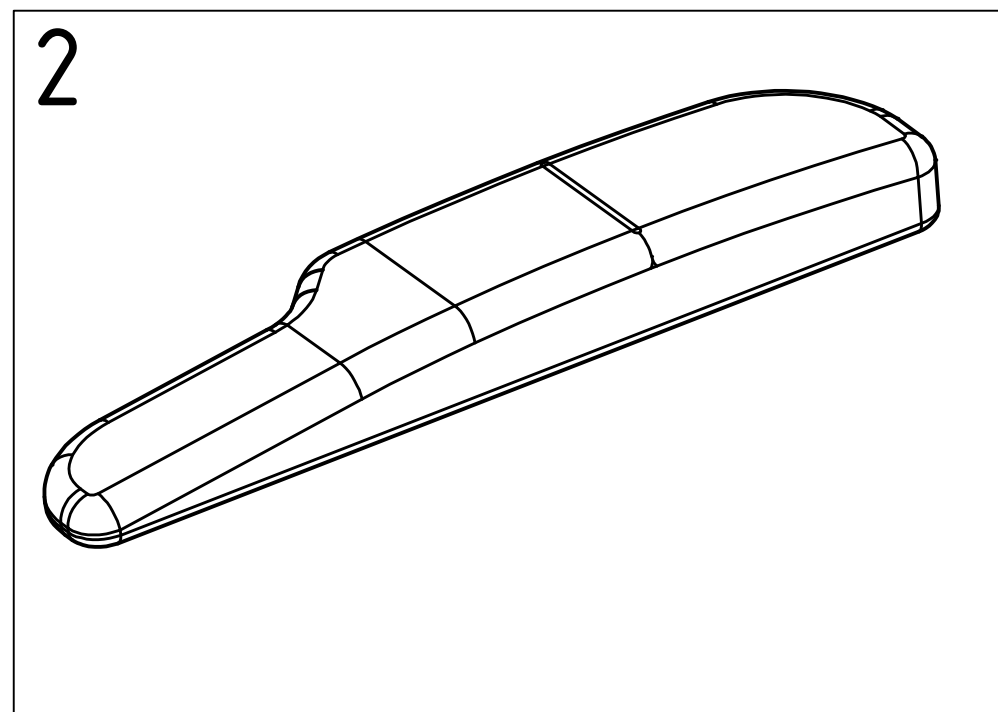


Stückliste BG2 - Seitenteil

Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8350221000	Seitenteil links komplett
1	8350222000	Seitenteil rechts komplett
2	8350224000	Armpolster rechts
2	8350225000	Armpolster links
3	8350227000	Seitenteilhalter links
3	8350228000	Seitenteilhalter rechts
4	8350230000	Kleiderschutz rechts
4	8350231000	Kleiderschutz links
5	8350232000	Seitenteil Rohrprofil rechts
5	8350233000	Seitenteil Rohrprofil links
6	8350235000	Seitenteil Profilschelle
7	8350236000	Klemmhalter für Halter Remote Control

Datum: 30.07.2013	Typ: Terra	Modell: 8350	
S/N			










Abgebildet "Seitenteil rechts"

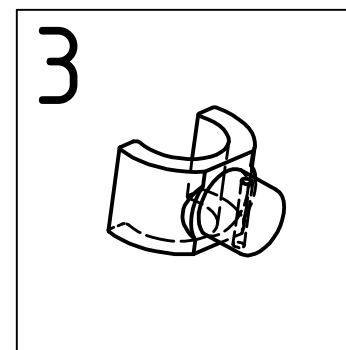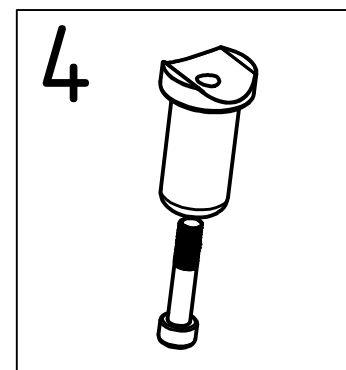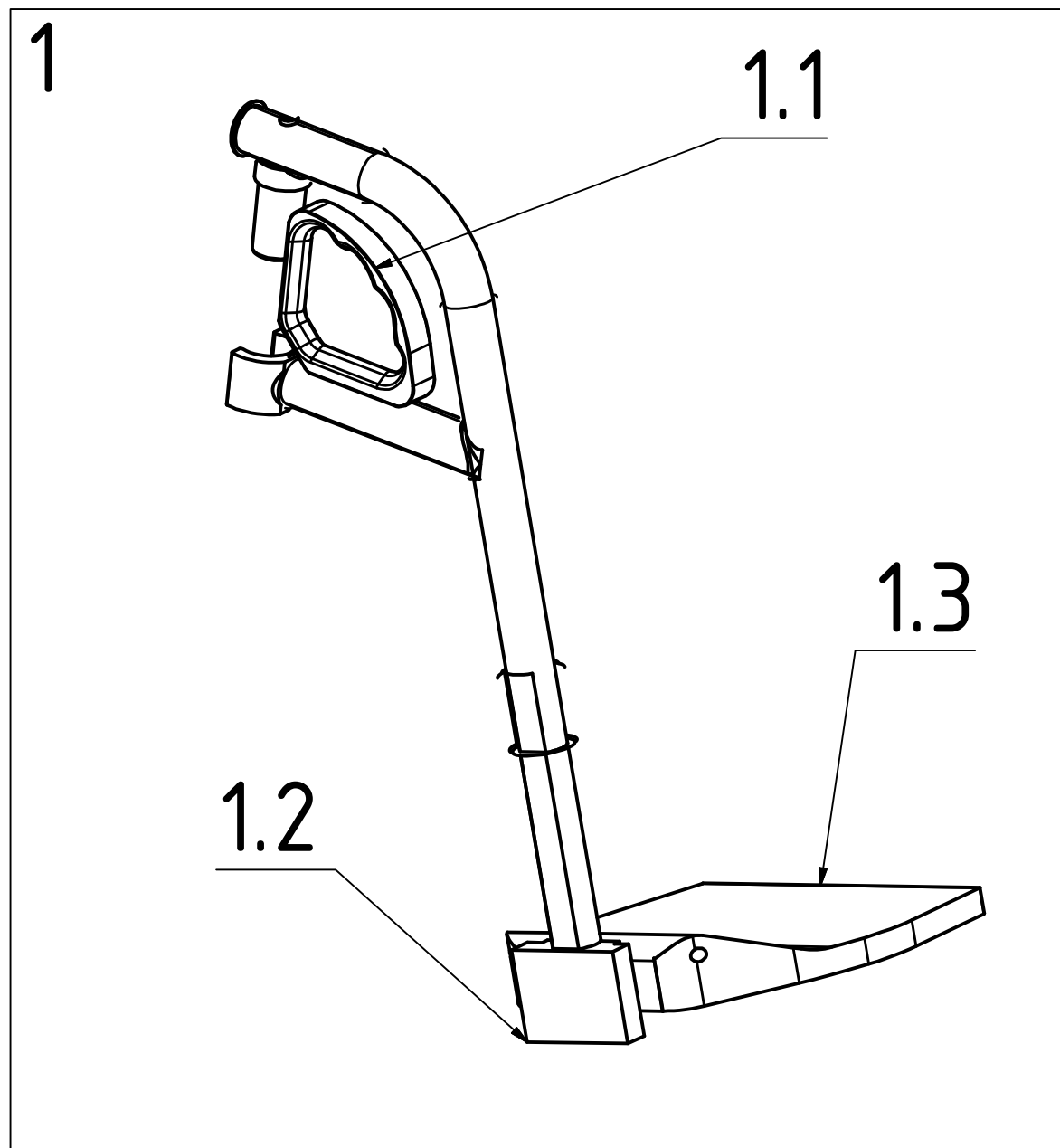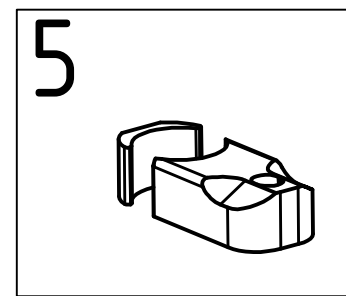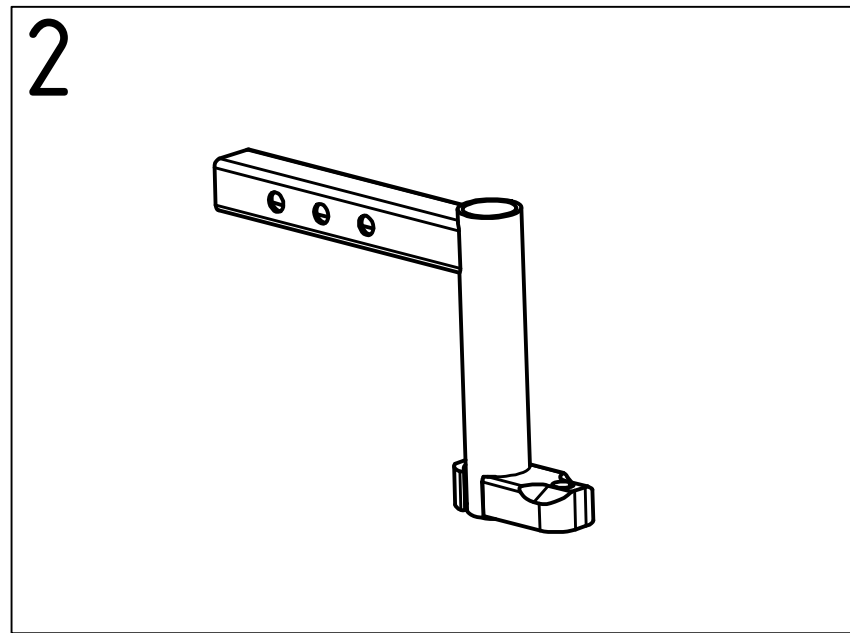








Stückliste BG3 - Beinstütze		
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8350301002	Beinstütze links komplett ab S/N C8350.....113
1	8350302002	Beinstütze rechts komplett ab S/N C8350.....113
1.1	8350320000	Handgriff für Beinstütze
1.2	8350329000	Zahnkranzgehäuse links, komplett
1.2	8350332000	Zahnkranzgehäuse rechts, komplett
1.3	8350333000	Fußplatte winkelfestst. SB 38-43cm
2	8350336000	Schieber für Beinstütze rechts ab S/N C8350.....113
2	8350337000	Schieber für Beinstütze links ab S/N C8350.....113
3	8350309000	Führungsprofil Beinstütze re+li
4	8350363000	Führungsbolzen d=21,2
5	8350340000	Arretierprofil Beinstütze
ohne Abb.	8350341000	Sicherungs Aluprofil Beinstütze

Datum: 30.07.2013	Typ: Terra	Modell: 8350	
S/N			



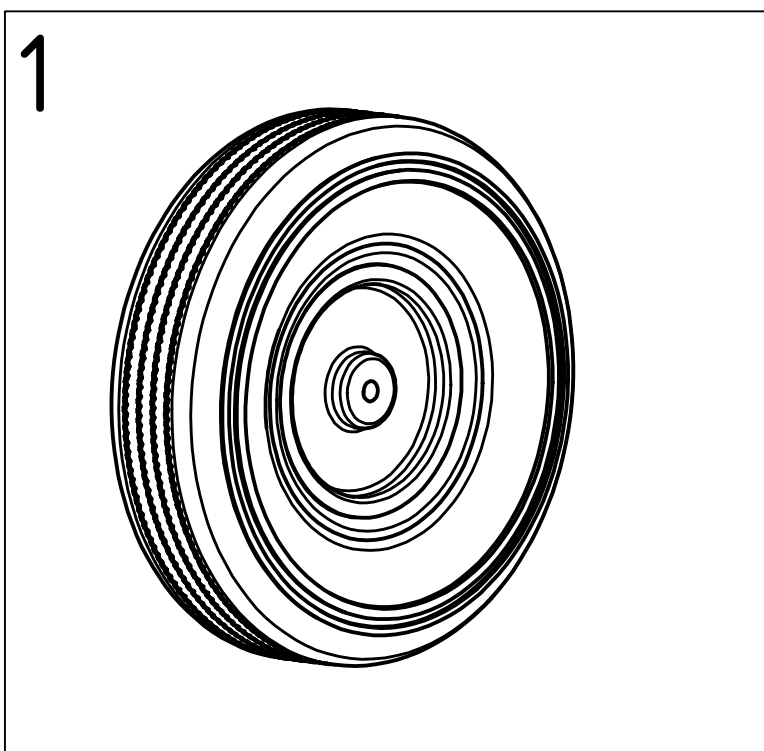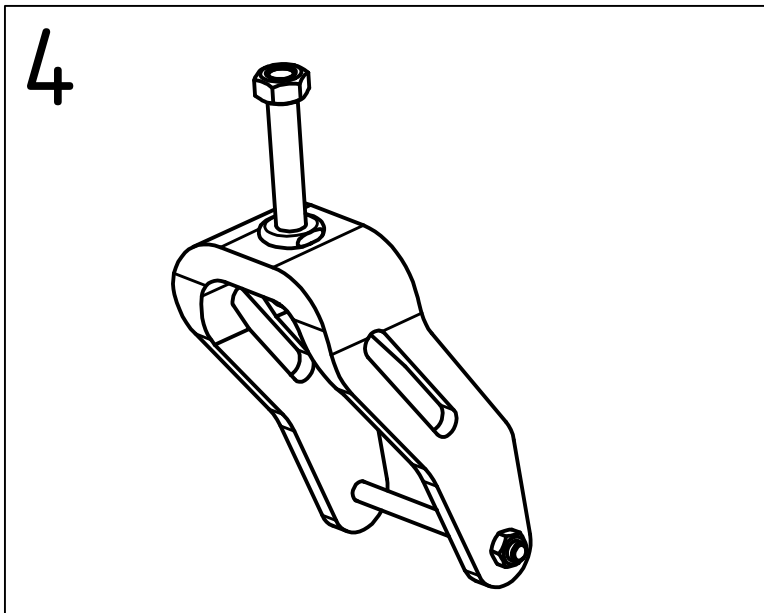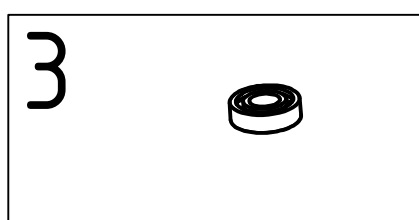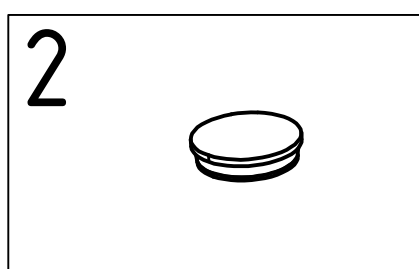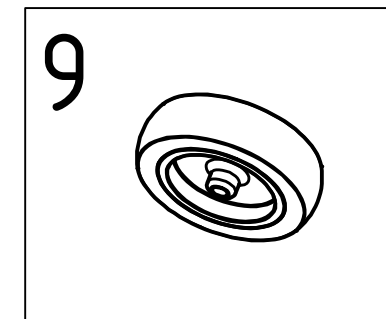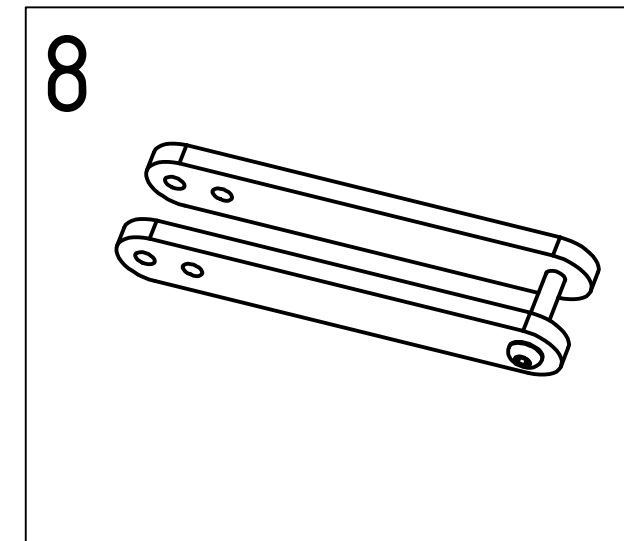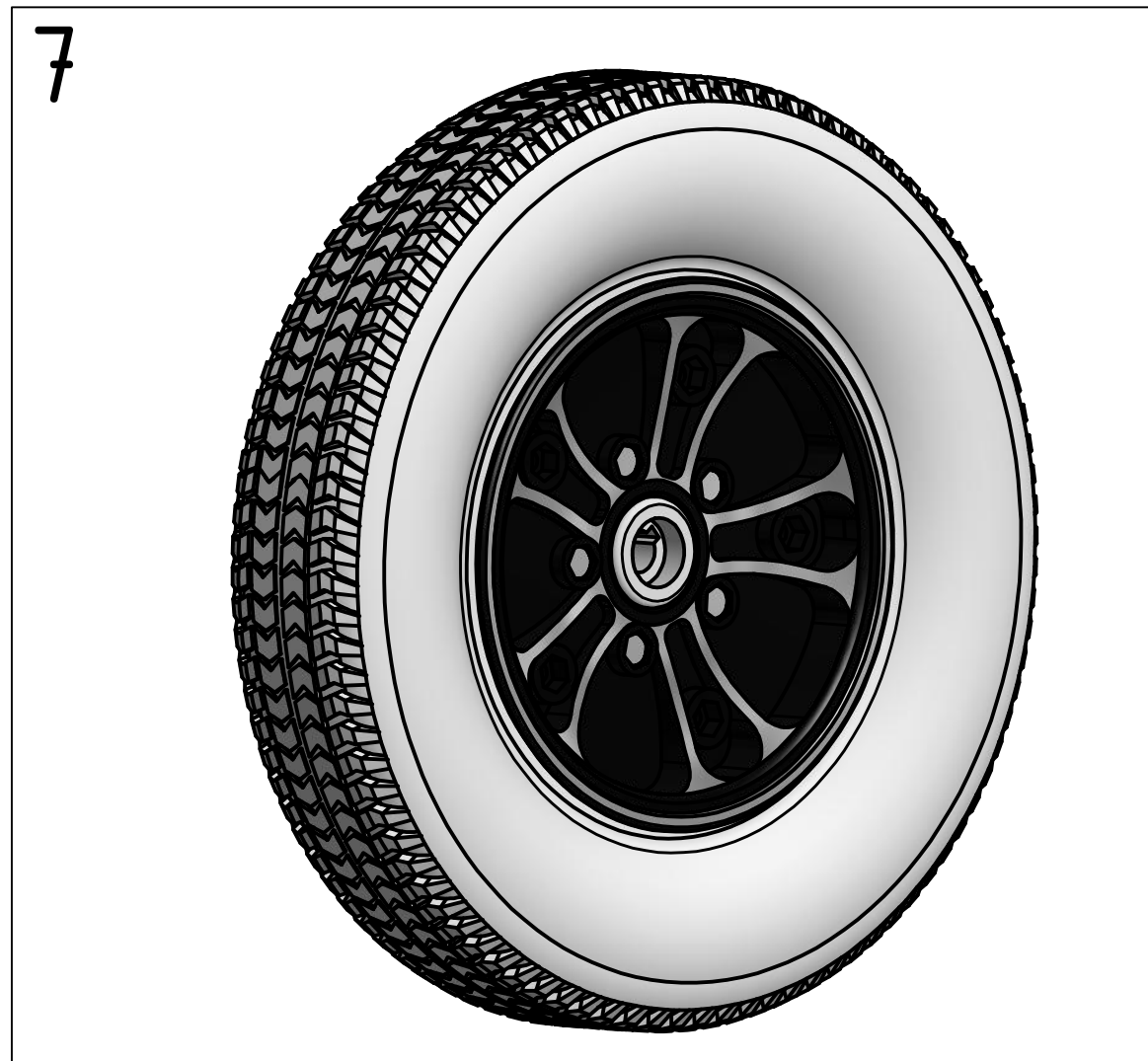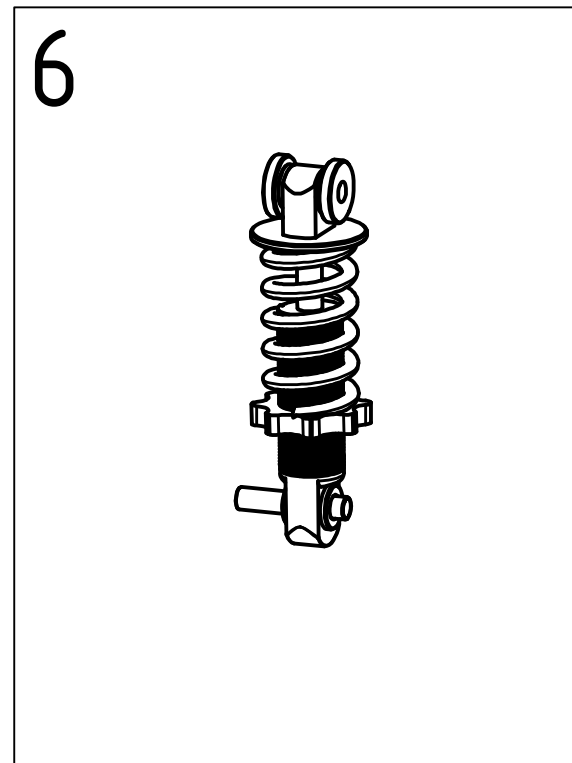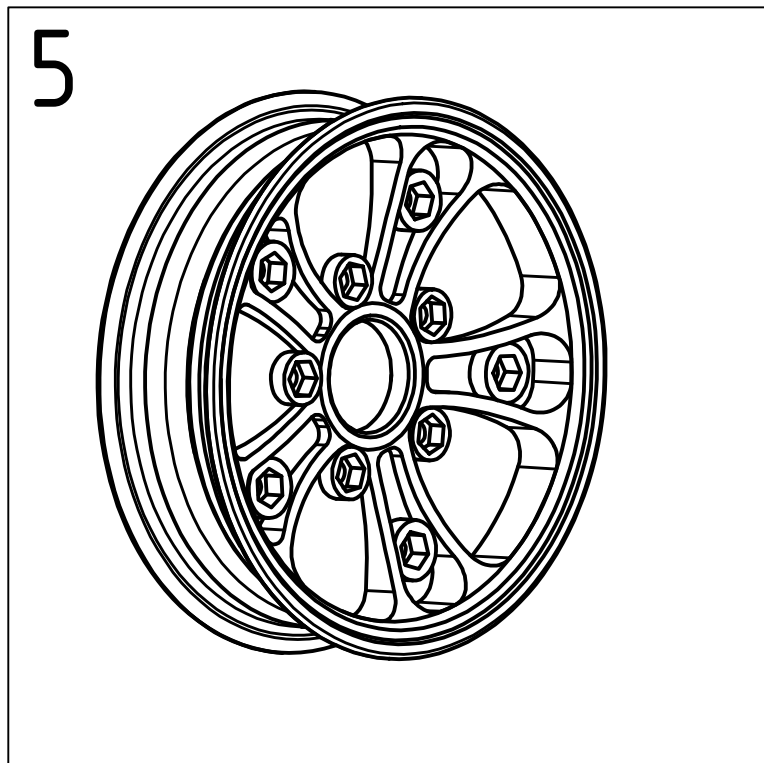

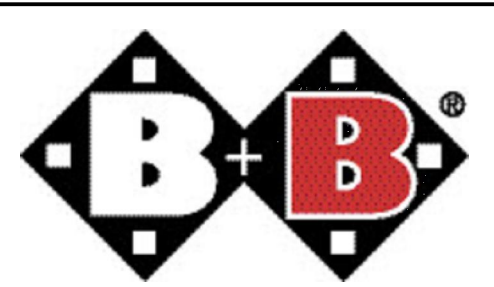
Stückliste BG4 und 5 - Vorder- und Hinterräder			
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung	
1	8350414000	Rad vorne 2.50-4 komplett, Pannensicher	
2	8350422000	Abdeckkappe Castorbuchse	
3	8350432000	Lenklager	
4	8350462000	Radgabel rechts und links komplett mit Lenkbolzen	
5	8350512000	Felge für Hinterrad 2-teilig, komplett	
ohne Abb.	8350522000	Paßfeder Hinterradflansch	
6	8350532000	Stoßdämpfer Hinterrad	
7	8350554000	Rad hinten 3.00-8 komplett, Pannensicher	
8	8350582000	Trägerprofile komplett für Kippschutzrolle	
9	8350584000	Kippschutzrolle	
Datum: 30.07.2013		Typ: Terra	Modell: 8350
S/N			

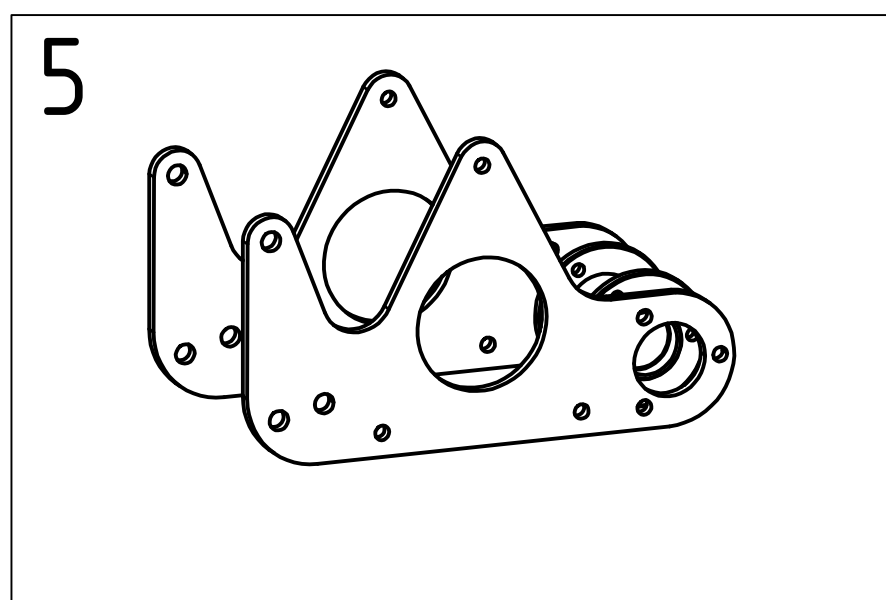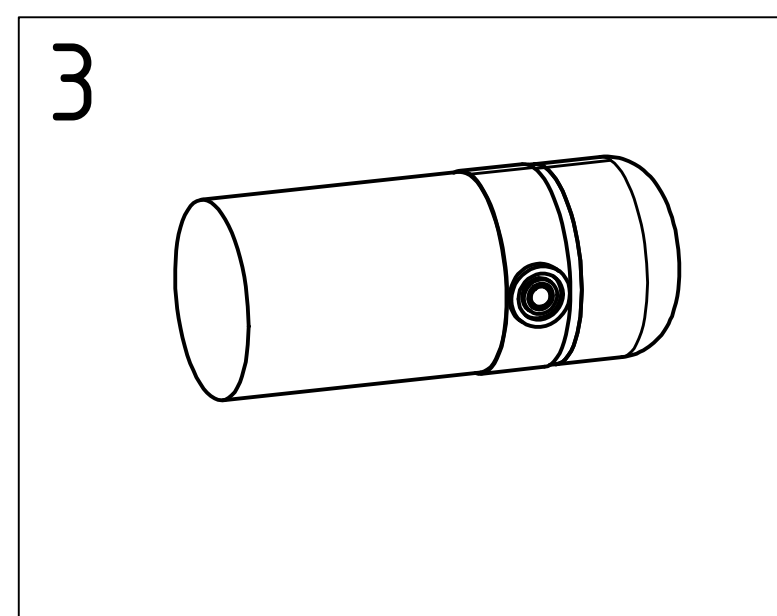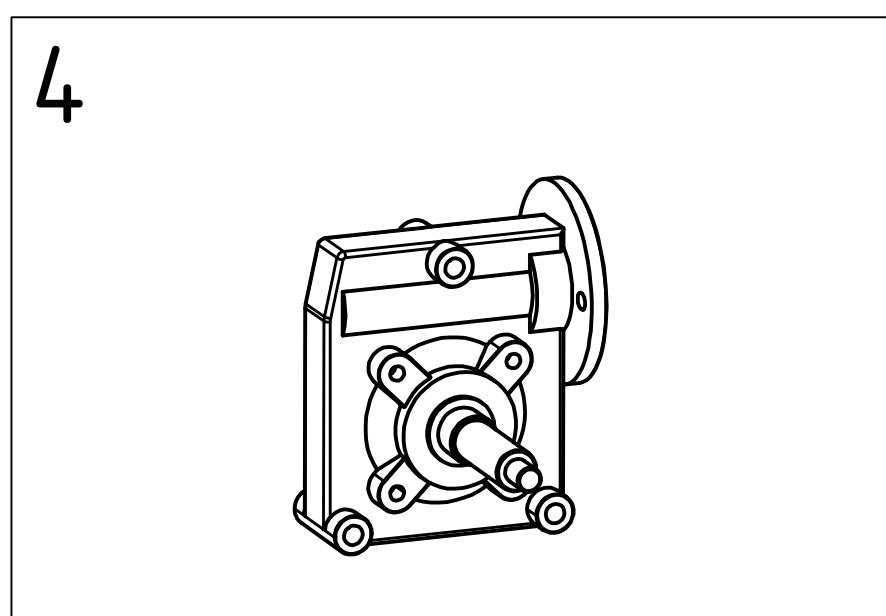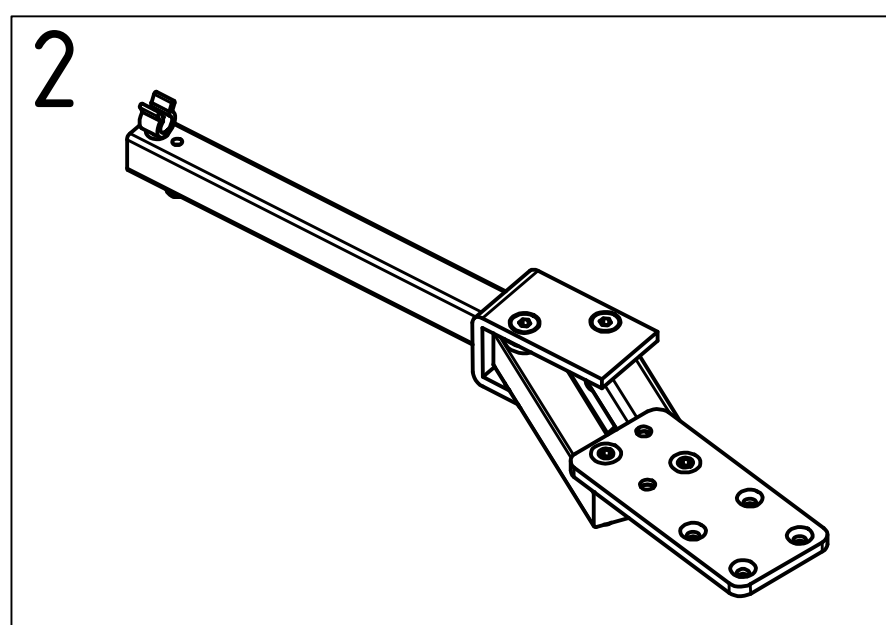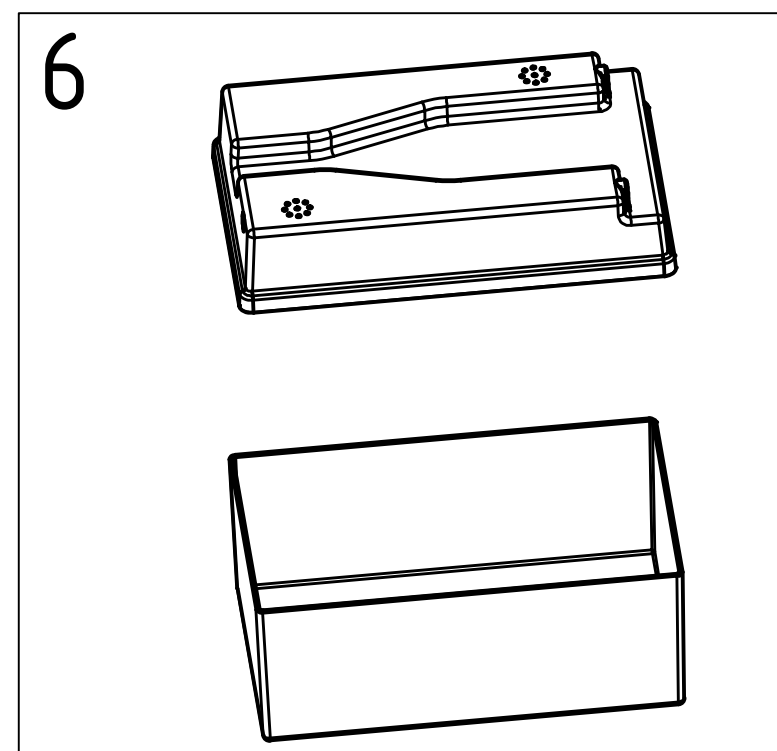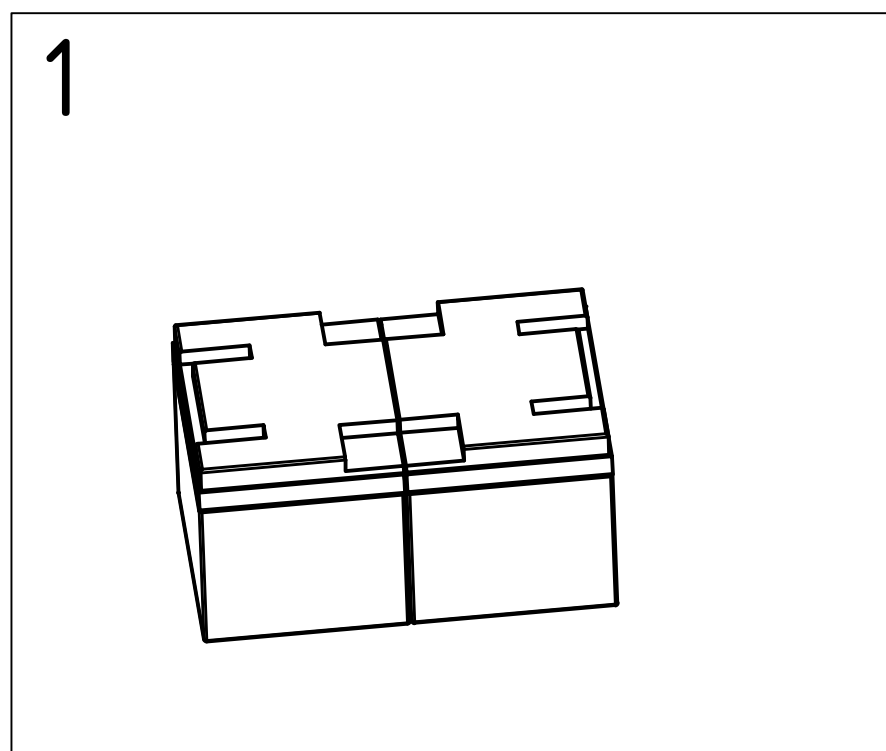


Stückliste - Elektronik und Beleuchtung

Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8350700000	Batterie 12V 50Ah
ohne Abb.	8350755000	Überlastsicherung 50A
ohne Abb.	8350711000	Kohlebürste DC Motor
2	8350811000	Halter Remote Control abschwenkbar
ohne Abb.	8350847000	Licht-Blinkerkombination StVZO
ohne Abb.	8350854000	Licht-Blinkerkombination rechts vorne StVZO
ohne Abb.	8350855000	Licht-Blinkerkombination links vorne StVZO
ohne Abb.	8350881000	Reflektor rot passiv rund
3	8350712000	Motor rechts DC24V 450W 5100RPM
3	8350713000	Motor links DC24V 450W 5100RPM
4	8350730000	Getriebe rechts komplett
4	8350731000	Getriebe links komplett
5	8350733000	Getriebehalter links komplett
5	8350734000	Getriebehalter rechts komplett
ohne Abb.	8350740000	Getriebe-Arretierkulissee komplett
ohne Abb.	8350741000	Bowdenzug für Getriebeentriegelung links
ohne Abb.	8350742000	Bowdenzug für Getriebeentriegelung rechts
6	8350780000	Batteriekasten komplett
ohne Abb.	8350790000	Kabelschutz
ohne Abb.	8350828000	VR-2 / VSI Lichtmodul
ohne Abb.	8350829000	VR-2 Power Modul 70A Terra
ohne Abb.	8350834000	VR-2 Remote Control mit Licht

Abgebildet "Motor und Getriebe rechts"  
Kabel werden nicht dargestellt


Datum: 30.07.2013	Typ: Terra	Modell: 8350	
S/N			

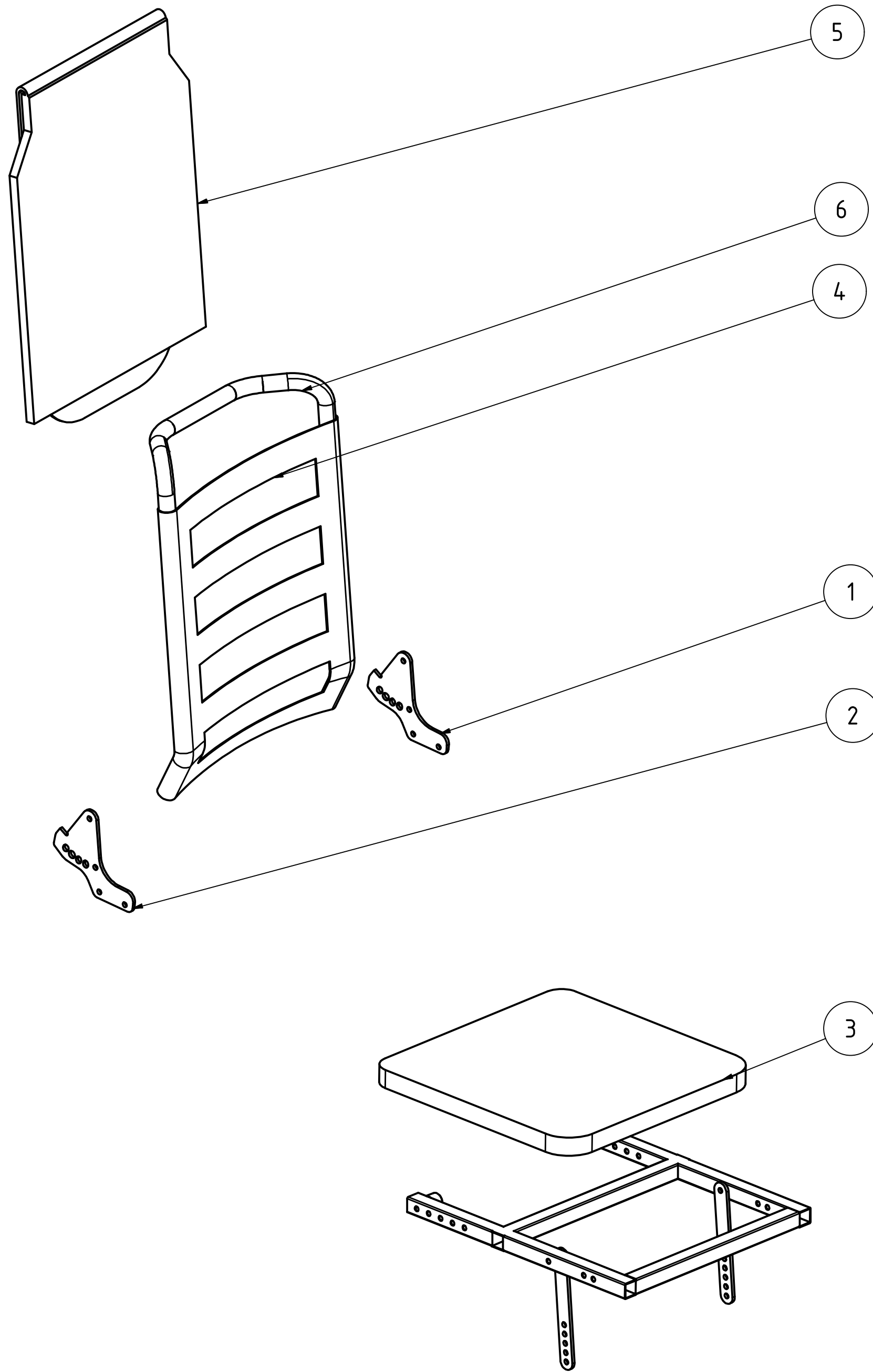

Stückliste BG9 - Sitz- und Rückeneinheit

Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung
1	8350901000	Rastkulisse links Rückenverstellung
2	8350902000	Rastkulisse rechts Rückenverstellung
ohne Abb.	8350903000	Verriegelungstifte mit Zugband für Rückenlehne
3	8350910000	Sitzpolster schwarz
4	8350920000	Rückengurt schwarz
5	8350921000	Rückenpolster schwarz
6	8350940000	Rückenrohr

Datum: 30.07.2013	Typ: Terra	Modell: 8350	
S/N			