


# Bischoff & Bischoff


Manual de instrucciones

## Curacao



Enjoy mobility.

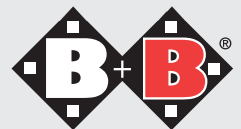

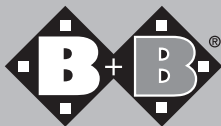

## **Asiento de bañera colgante Curaçao (sin respaldo)**

### **Estimado cliente,**

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha B+B obtiene un producto alemán de primera calidad que le facilitará el cuidado en casa.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del accesorio de asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto.

### **1. Declaración de conformidad**

En calidad de fabricante del producto, B+B declara que el asiento de bañera colgante Curaçao cumple íntegramente los requisitos de la directiva 93/42/CEE.

### **2. Información para la utilización del producto**

El asiento de bañera colgante Curaçao está exclusivamente diseñado para sentarse en la bañera durante el baño.

### **3. Finalidad de uso - Indicaciones**


Reducción o falta de funcionalidad considerables de las extremidades inferiores (p. ej., amputaciones, cojeras, enfermedades articulares o neuromusculares). Secuelas crónicas derivadas de enfermedades con pérdida de fuerza en las extremidades inferiores y superiores.

### **4. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485**

- Se requiere la ayuda de otra persona para sentarse y levantarse.
- 120 kg de capacidad de carga máxima.
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al fijar la superficie de asiento en el armazón del asiento.
- La superficie de asiento solo sirve para sentarse.
- Compruebe que las piezas laterales estén bien fijadas en la parte interior de la bañera.

### **5. Uso**

El asiento de bañera colgante Curaçao se cuelga en la bañera de forma que los dispositivos antideslizantes queden sobre los bordes de la misma.

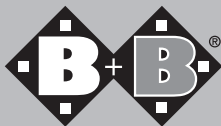

## 6. Cómo ensamblar y montar el asiento

Inserte el armazón lateral en el armazón del asiento y fíjelo desde abajo con los tornillos prisioneros (véanse las figuras 1 y 2).

Armazón del asiento

Armazón lateral

Asiento

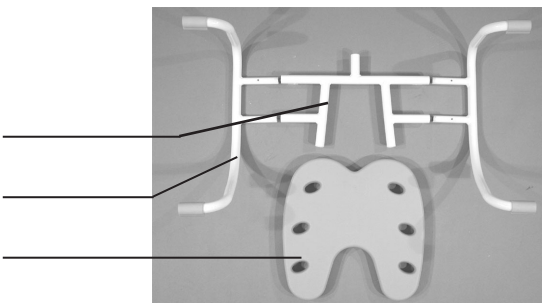


Fig. 1

### Atención:

En el ensamblaje de la estructura del armazón asegúrese de que:

- La parte del armazón lateral con 90° de inclinación esté orientada hacia atrás.
- El hueco del asiento esté orientado hacia delante.

## 7. Cómo ajustar la anchura del asiento colgante

Para ajustar la anchura del asiento colgante afloje los tornillos prisioneros situados debajo del armazón del asiento y tire hacia fuera de las piezas laterales (véase la fig. 2).

Atención:

Los puntos marcados en rojo indican el ajuste máximo de la anchura del asiento colgante (véase la fig. 3).

## 8. Cómo montar y extraer el asiento

El asiento encaja a presión en el armazón (véase la fig. 4).

Para extraer el asiento, sujételo firmemente por el armazón lateral y extraiga el asiento del armazón (véase la fig. 5).

## 9. Limpieza y desinfección del asiento de bañera colgante

Limpie y desinfecte el asiento solo con productos convencionales.



Fig. 2

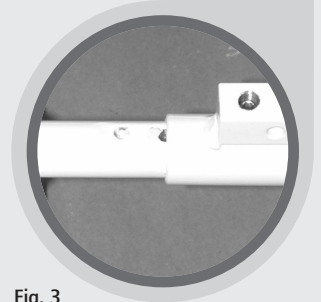


Fig. 3



Fig. 4


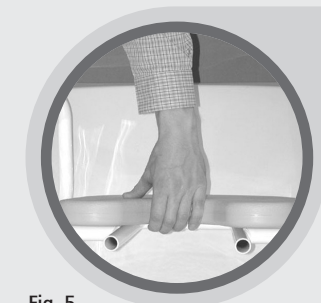


Fig. 5

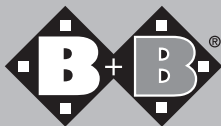

## 10. Datos técnicos

- 120 kg de capacidad de carga máxima
- An./al./pr. (en mm): 690-790/520/270
- Peso: 3,1 kg
- Anchura/profundidad de la superficie de asiento: 400/400 mm
- Intervalo de ajuste: de 590 a 690 mm (parte interior de la bañera)
- Resistencia al calor: hasta 125 °C
- Color: azul o blanco

## 11. Herramientas de ajuste y reparación

- 1 × destornillador de cruz
- 1 × llave angular de cabeza hexagonal n.º 5

## 12. Identificación del producto

El armazón del producto lleva un adhesivo identificativo en el que figura el nombre del producto, el número de serie, el peso máximo del usuario y la dirección de la empresa.

## 13. Garantía

Solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en las condiciones indicadas y para los fines previstos.

El producto debe devolverse en el embalaje original.

## 14. Suministro del equipamiento de serie

- 1/1 × pieza lateral izquierda/derecha
- 1 × superficie de asiento B+B
- 1 × armazón del asiento

## **Certificado de garantía**

(Observe nuestras condiciones generales)

**Modelo:** Asiento de bañera colgante Curaçao

**Número de serie:\***

(debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:**

**Fecha y sello**

\* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

