

**MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.**

P.I. Can Mascaró

C/Ponent, Nave 1-A

E-08756 La Palma de Cervelló

[www.bbiberia.es](http://www.bbiberia.es)

**el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH**

Becker-Görling-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

**Bischoff & Bischoff**

Manual de instrucciones

**VFG  
GS-R/L**



**VFG (Bastón de cuatro patas)**  
**GS- R/L (Bastón para diestros y zurdos)**

**Estimado cliente:**

Este manual de instrucciones debería ayudarle a familiarizarse con el manejo de su andador B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

**1. Cómo ajustar la altura del bastón**

- Afloje la tuerca de unión
- Presione el perno de resorte y coloque el bastón en la posición ortopédicamente correcta
- Encaje el perno de resorte
- Apriete la tuerca de unión

**2. Atención: indicaciones de seguridad, análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485**

- 100 kg de capacidad de carga máxima
- Asegúrese de la correcta colocación de las conexiones de enchufe
- Indicaciones después de ajustar la altura:
- Asegúrese de la correcta colocación del perno de resorte
- Asegúrese de que la tuerca de unión esté correctamente fijada
- Utilícelo solo sobre una superficie firme y llana

**3. Datos técnicos**

	<b>VFG</b>	<b>GS-R/L</b>
Peso	0,8 kg	0,3 kg
Altura	74-97 cm	74-97 cm
Niveles	10	10
Color	Anodizado de bronce	Anodizado de bronce

**Certificado de garantía**

(Observe nuestras condiciones generales)

**Modelo:** VFG / GS-R/L

**Número de serie:\***

(debe anotarlo el comercio especializado)

**Distribuidor:**

Fecha y sello

\* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral