

# Bischoff & Bischoff

Manual de instrucciones

## MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

P.I. Can Mascaró

C/Ponent, Nave 1-A

E-08756 La Palma de Cervelló

[www.bbiberia.es](http://www.bbiberia.es)

## el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Görling-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070 • Fax: +49 (0)700/6000 8080

[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)


[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)

## Rezi Gebo



CE

Enjoy mobility. 

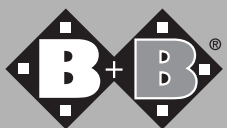

**Rezi (andador recíproco)**

**Gebo (andador fijo, plegable)**

**Estimado cliente:**

Este manual de instrucciones debería ayudarle a familiarizarse con el manejo de su andador B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de una mayor movilidad.

**1. Cómo desplegar el andador**

Mueva las piezas laterales con asideros hacia fuera hasta que oiga que encajan.

**2. Cómo plegar el andador**

Apriete el bloqueo telescópico y, simultáneamente, desplace hacia adentro primero el lado derecho y luego el lado izquierdo.

**3. Cómo ajustar al altura del bastidor**

Presione el perno de resorte y encaje la barra vertical en la posición correcta desde el punto de vista ortopédico.

**4. Atención: indicaciones de seguridad. análisis de riesgo según DIN EN ISO 13485**

- 120 kg de capacidad de carga máxima
- Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al plegar el andador
- Indicaciones después de ajustar la altura:
  - Asegúrese de la correcta colocación del perno de resorte
  - Ajuste los 4 pies a la misma altura
  - Utilícelo solo sobre una superficie firme y llana

**5. Datos técnicos**

	<b>Rezi</b>	<b>Gebo</b>
Peso	2,5 kg	2,2 kg
Altura del armazón	82-92 cm	82-92 cm
Barras transversales	3	2
Ajuste de la altura	5x	5x
Color	bronce	bronce
Dimensiones (plegado)		
Anchura	53 cm	58 cm
Profundidad	10 cm	10 cm
Altura	variable	variable

**Certificado de garantía**

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Rezi / Gebo

Número de serie:\*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

\* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral