


Manual de instrucciones

HELMA

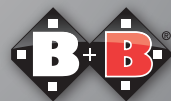

Enjoy mobility.



1. Funcionamiento

Alternando la presión a un ritmo suficiente evita la compresión vascular prolongada que pueda causar hipoxia tisular. Alternando la presión del colchón se adapta a la del paciente y su posición.

2. Pautas para el uso

El método tradicionalmente aceptado de control de úlcera por presión es mover al paciente a intervalos regulares de tiempo, y observar las áreas de riesgo con regularidad.

El colchón está destinado a cumplir con este tratamiento, pero no se debe abandonar la observación del paciente y moverle cuando sea necesario.

General

- Para los pacientes que son propensos a pasar más de 15 horas por día en la cama.
- Para los pacientes que son clasificados como riesgo medio-alto de desarrollar úlceras por presión.

3. Características del colchón

Peso Max.: 110 Kg

Dimensiones Colchón: 200 x 90 x 6,4 cm (70 cm de solapas)

Material: PVC 0.3 mm

Garantía: 6 meses

4. Características Compresor

Tiempo del ciclo: 6 Mins.

de aire: 6 - 7 L /Min. Emisión

presión: 70 - 130 mmHg Variación

Alimentación: 110 - 120 / 220 - 240 Volts

Protección contra shocks eléctricos: Class II

Garantía: 2 años

5. Instalación / Uso

1. Extender el colchón
2. Posicionar encima de la cama
3. Asegurar a la cama con la entremetida bajo el colchón de la cama.
4. Colgar el compresor en el extremo de la cama (lado de los pies), utilizando los ganchos.
5. Conectar el cable de suministro de energía eléctrica para el compresor.
6. Pulsar el interruptor para encender el compresor.
7. Antes de la colocación del paciente sobre el colchón, esperar a que el colchón este totalmente inflado.
8. Utilizar siempre una sábana separadora entre el colchón de burbujas y el paciente.

6. Medidas de Seguridad

- PRECAUCION cuando utilice este equipo eléctrico.
- NO dejar conectado a la red eléctrica cuando no se utilice.
- NO exponer el equipo a demasiada humedad.
- NO utilice productos de limpieza corrosivos tales como desengrasantes o disolventes industriales.

7. Limpieza y Desinfección

Compresor

- Desconectar de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Tenga cuidado al utilizar un paño impregnado con un detergente suave.

Utilice un paño impregnado con una solución de producto detergente o un detergente superficie / desinfectante con la marca CE .

8. Mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento del compresor deben ser estrictamente realizadas por un técnico autorizado o por el importador.

Documento de garantía

(Tenga en cuenta nuestras condiciones comerciales generales)

Producto: Helma

Número de serie:*

* (a introducir por la ortopedia)

Ortopedia:

Fecha y sello

*Las etiquetas de características se encuentran debajo del compresor

Movilidad B&B Iberia S.L.

P. I. Can Mascaró · C/Ponent, Nave 1-A

08756 La Palma de Cervelló

www.bbiberia.es

el fabricante:

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Görling-Straße 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com