


Instrucciones de manejo

RL-Paso

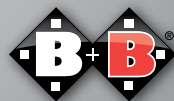

Enjoy mobility.



Andador con dos ruedas RL-Paso

Estimado cliente

Con la adquisición de este andador B+B usted dispone de un producto puntero alemán que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.

El presente manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse mejor con el manejo y así sentirse seguro con él.

¡Le deseamos mucha satisfacción y más movilidad con nuestro producto!

Indicaciones / Contraindicaciones

- El andador ayuda a andar a personas con limitaciones de movilidad, que al mismo tiempo presenten trastornos de coordinación/ del equilibrio.
- El andador sirve para asegurar la función de movilidad restante.
- El asiento permite poder descansar o hacer pausas cuando los trayectos son más largos.
- El andador sólo se debe utilizar sobre suelos llanos y firmes.
- El producto no se debe utilizar como ayuda para subirse o como medio de transporte para cargas pesadas.

Advertencias de seguridad

- Capacidad de carga máx. del RL-Paso 130 kg
- ¡Conducir sólo sobre suelos llanos y firmes!
- ¡Tener en cuenta la profundidad de inserción mínima de las barras de las empuñaduras (marca)!
- ¡Para la limpieza no aplicar productos agresivos ni corrosivos!
- Extraiga siempre la bandeja antes de sentarse.




Cómo desplegar el andador

Posicione el RL-Paso de tal modo por delante que los amortiguadores de goma señalen hacia usted.

- Empuje ahora sobre las empuñaduras. Las ruedas ruedan ahora hacia delante y el RL-Paso se mantiene de pie.

En caso de disponer de accesorios opcionales:

- Pliegue ahora el asiento hacia atrás hasta que éste apoye.
- Ahora puede enganchar la cesta para utensilios desde adelante.
- Usted puede colocar la bandeja sobre el asiento. Asegúrese que las espigas de plástico encajen en los agujeros.

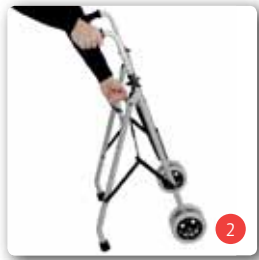

Cómo plegar el andador

- Extraiga primero la cesta de utensilios y la bandeja.
- Pliegue ahora el asiento hacia delante.
- A continuación vuelque el andador ligeramente hacia usted.
- Agarre ahora la cinta y tire de ella hacia arriba. Durante estos procesos de plegado tenga cuidado de no pillarse partes del cuerpo o de la ropa.
- El andador se encuentra ahora plegado de forma plana y se puede guardar economizando espacio.

Ajustar las empuñaduras correderas

- El RL-Paso debe estar firme.
- Desenrosque por completo la tuerca en estrella. Extraiga ahora el tornillo del agujero.
- Sitúese detrás del RL-Paso con los brazos colgando hacia abajo.
- Ajuste ahora las empuñaduras correderas de tal forma que se encuentren a la altura de las muñecas.
- Inserte el tornillo en el agujero más cercano posible y apriete de nuevo fijamente la tuerca en estrella.

Uso

El RL-Paso está equipado con dos ruedas adelante y dos patas de pie atrás. Agarre las empuñaduras del RL-Paso. Para andar con éste de forma segura haga primero pequeños pasos hacia delante. A continuación levante el RL-Paso atrás ligeramente y ruédelo hacia delante.

Asegúrese que el suelo sea firme. No sitúe el RL-Paso demasiado hacia delante, usted podría caerse. Una vez apoyado de nuevo el RL-Paso usted puede continuar andando. Repitiendo este procedimiento usted avanzará tramo a tramo.

Datos técnicos

Capacidad de carga:	máx. 130 kg
Carga cesta:	máx. 5 kg
Altura de la empuñadura:	75 - 86 cm (7 opciones de ajuste)
Altura total:	78,5 - 89,5 cm
Longitud:	65,5 cm
Ancho:	58,8 cm
Altura del asiento:	51,5 cm
Peso:	3,0 kg
	4,5 kg (incl. cesta, asiento y bandeja)
Bandaje, adelante:	bandaje doble 6"
Topes de goma, atrás:	ø 40 mm
Marco:	aluminio, recubierto de polvo

Equipamiento:

- Empuñaduras con forma anatómica


Accesorios opcionales:

- Cesta
- Bandeja
- Asiento

Accesorios de montaje

El montaje del asiento se lleva a cabo con las grapas adjuntas en la barra transversal delantera.

- Asegúrese que las grapas se fijen fuera de los remaches de limitación. De esta manera se garantiza que el asiento apoya de forma centrada sobre la barra transversal.

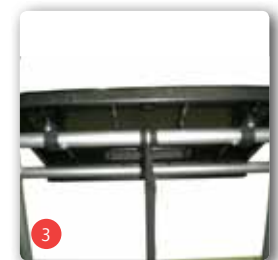

Reutilización

- El andador es apto para la reutilización (véase el plan de mantenimiento B+B).

Limpieza

La limpieza del RL-Paso se debe llevar a cabo en intervalos regulares (es obligatorio en caso de cambiar de usuario). Utilice para la limpieza una lejía jabonosa suave sin aditivos abrasivos.

Podrá llevar a cabo una desinfección con productos desinfectantes de corriente uso comercial.

¡No utilice equipos de chorro a vapor ni productos de limpieza abrasivos o corrosivos!

Garantía

La garantía se refiere a todos los defectos del producto que se deban a defectos de material o de fabricación que se puedan demostrar. En caso de reclamaciones se deberá entregar el documento de garantía cumplimentado íntegramente.

Para el andador RL-Paso ofrecemos una garantía de 2 años en las piezas del bastidor. Ofrecemos una garantía de 1 año para todos los demás componentes de montaje.



Si no se observan las instrucciones de funcionamiento o no se realizan como es debido las labores de mantenimiento, así como si se realizan en particular modificaciones y reparaciones sin autorización de la empresa Bischoff & Bischoff, esto conllevará el vencimiento de la garantía y de la responsabilidad de producto en general.

Para cualquier pregunta, el servicio al cliente de B+B estará a su disposición en el teléfono +34 931 600 029.

Documento de garantía

(Tenga en cuenta nuestras condiciones comerciales generales)

Modelo: Andador con dos ruedas RL-Paso

Número del modelo:

Número de serie:*

* (lo deberá escribir la ortopedia)

Ortopedia:

Fecha y sello

*Las etiquetas de características se encuentran en el bastidor lateral

Notas

Movilidad B&B Iberia S.L.

P.I. Can Mascaró/Ponent, 1
08756 La Palma Cervelló
www.bbiberia.es

el fabricante:

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com

