


Manual de montaje
Placa adaptadora
TOGO



Enjoy mobility.

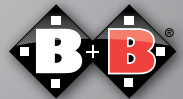

Pasos de montaje

- Coloque la silla de ruedas sobre una superficie plana y disponga las dos ruedas en la dirección de desplazamiento (fig. 1).



- Retire los topes para pies a izquierda y derecha (fig. 2).





- Monte en su lugar las ruedecillas antivuelco necesarias para la silla de ruedas (fig. 3).



- Si es posible, busque un punto de sujeción horizontal y vertical situado en el área del alojamiento de la rueda (fig. 4)


TOGO | Sistema auxiliar de empuje

- Ponga ambas pinzas (en cada lado) en estos puntos de sujeción y apriete levemente con los tornillos M6X40 de forma que las pinzas se puedan seguir moviendo (fig. 5).

¡No usar aún los tornillos M8X50!

Atención:


En caso de diámetros pequeños de tubos, girar la chapa de la pinza.

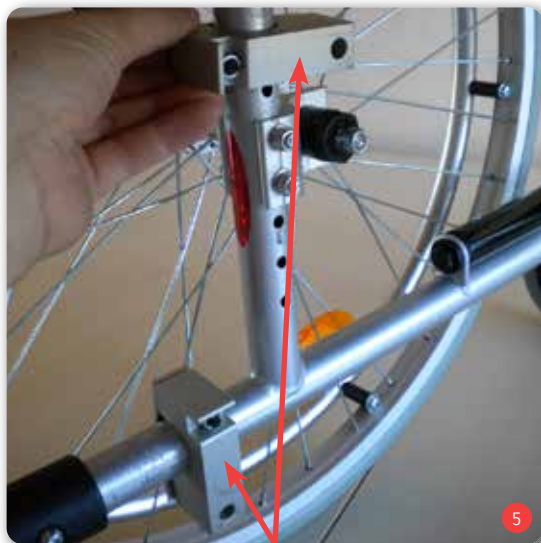

pinzas

- Para sillas de ruedas con placa de adaptación para instalar las ruedas motrices (por ejemplo, Pyro Light Optima), si es posible, localice los puntos de fijación en el tubo horizontal inferior del chasis. (Fig.6)



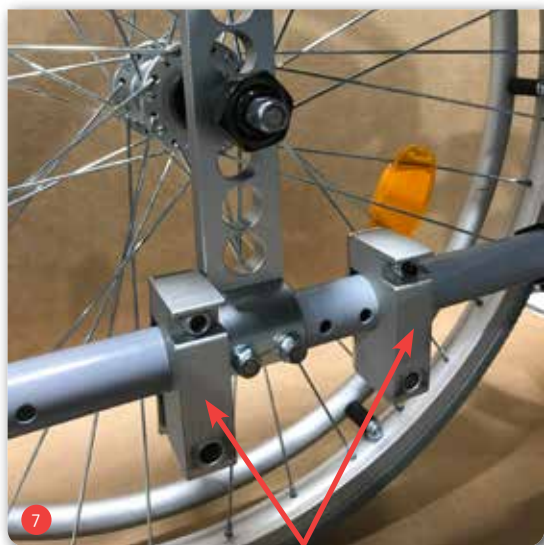

pinzas

- Ponga ambas pinzas (en cada lado) en estos puntos de sujeción y apriete levemente con los tornillos M6X40 de forma que las pinzas se puedan seguir moviendo (fig. 7).
iNo usar aún los tornillos M8X50!

Atención:

En caso de diámetros pequeños de tubos, girar la chapa de la pinza.



- Coloque la placa adaptadora en la pinza y busque la ranura horizontal/vertical más adecuada para sujeción.
- Fije ahora la placa adaptadora a las pinzas (tornillos M8X50).

Atención:

No apretar aún los tornillos por completo, para poder desplazar vertical y horizontalmente la placa adaptadora con la pinza (fig. 8).

TOGO | Sistema auxiliar de empuje

Atención: (no incluido en suministro)

Para facilitar el montaje, Bischoff & Bischoff ofrece un elemento auxiliar de montaje (fig. 9 y 10)

Art. n.º 8010199000




- Si es posible, busque un punto de sujeción horizontal y vertical que se encuentre en el área del alojamiento de la rueda (fig. 10).



Colocación final

Para conseguir una conducción óptima y una aplicación y retirada correctas del sistema auxiliar de empuje, tenga en cuenta lo siguiente:

- **Altura:**
Coloque la placa adaptadora de forma que la distancia entre el borde inferior (en toda su longitud) y el suelo sea de 11,5 cm (fig. 11).

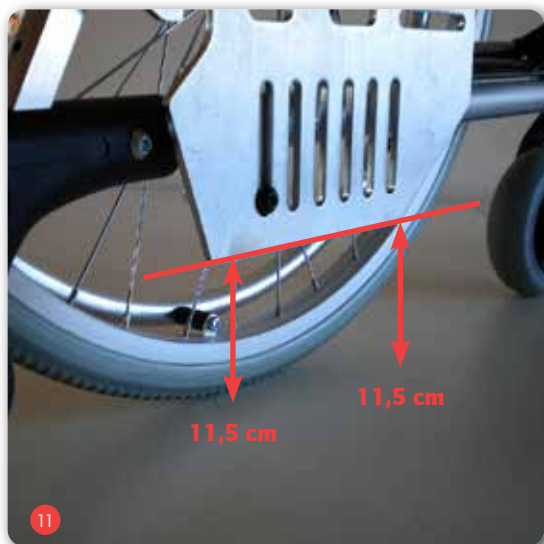

- **Profundidad:**
Procure posicionar la placa adaptadora de forma que las ruedas activas del sistema auxiliar de empuje queden aproximadamente en línea con las ruedas activas de la silla de ruedas (fig. 12).



Una vez colocada correctamente la placa adaptadora, apriete firmemente todos los tornillos de sujeción.

Notas

MOVILIDAD B+B IBERIA S.L.

P.I. Can Mascaró

C/Ponent, Nave 1-A

E-08756 La Palma de Cervelló

www.bbiberia.es

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification

