



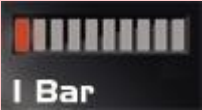

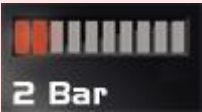




# Flash Codes

Enjoy mobility.



Fehlercodes – Blinkcodes für Steuerung Centuro Scooter

Flash Code	Beschreibung	Description	Descripción
 1 Bar	Batterien entladen. Batterie müssen nachgeladen werden	Batteries discharged. Batteries need to be recharged	Baterías descargadas. Baterías necesitan recargarse
 2 Bar	Batterien entladen UND/ODER Batterien defekt, Verkabelung fehlerhaft	Batteries discharged AND/OR Batteries defective, incorrect wiring	Baterías descargadas y/o Baterías defectuosas, cableado incorrecto
 3 Bar	Versorgungsspannung am Controller zu hoch	Supply voltage on the controller too high	Entrada de voltaje en el mando demasiado alta.
 4 Bar	Überschreitung Zeitlimit für maximale Stromabgabe ODER Überhitzung/Überlastung des Motors	Exceeded time limit for maximum power output OR overheating / overloading the motor	Excedido el límite de tiempo para potencia máxima de salida. O Sobrecalentamiento/sobrecarga del motor
 5 Bar	Motorbremse manuell entriegelt ODER Motorbremse fehlerhaft	Motor brake manually unlocked OR Engine brake faulty	Freno de motor desbloqueado manualmente O Freno del motor averiado
 6 Bar	Abschaltung durch angeschlossenes Ladegerät ODER Abschaltung der Steuerung durch Sonderereignis (z. Bsp. Gyromodul)	Shutdown by connected charger OR shutdown of the control due to a special event (e.g. gyro module)	Apagado por cargador conectado O Apagado del control por un motivo especial (por ejemplo, módulo de giro)
 7 Bar	Drehknopf für Geschwindigkeitsregelung fehlerhaft	Speed control faulty	Fallo del control de velocidad
 8 Bar	Motor fehlerhaft ODER Verkabelung Motor fehlerhaft	Faulty motor OR faulty motor wiring	Motor defectuoso O Defecto del cableado del motor
 9 Bar	Andere Fehler Steuerung fehlerhaft Fehlerspeicher prüfen	other errors Control faulty Check fault memory	Otros errores Control defectuoso Comprobar la memoria de fallos