




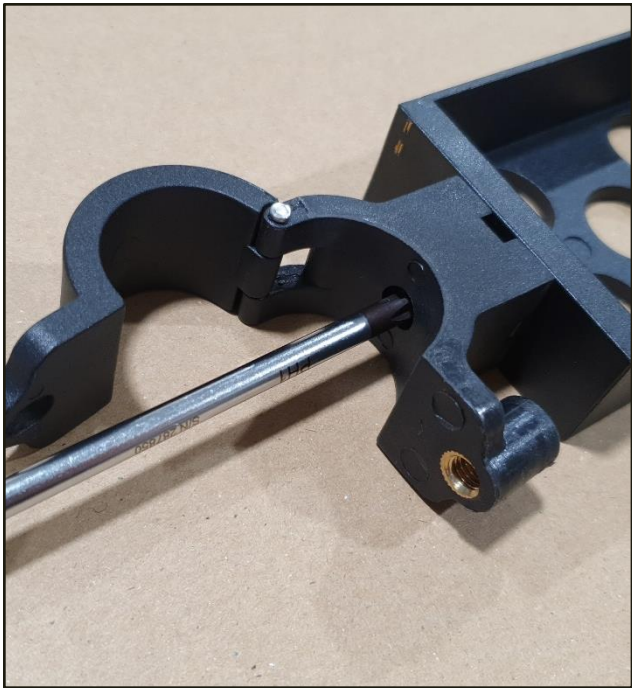
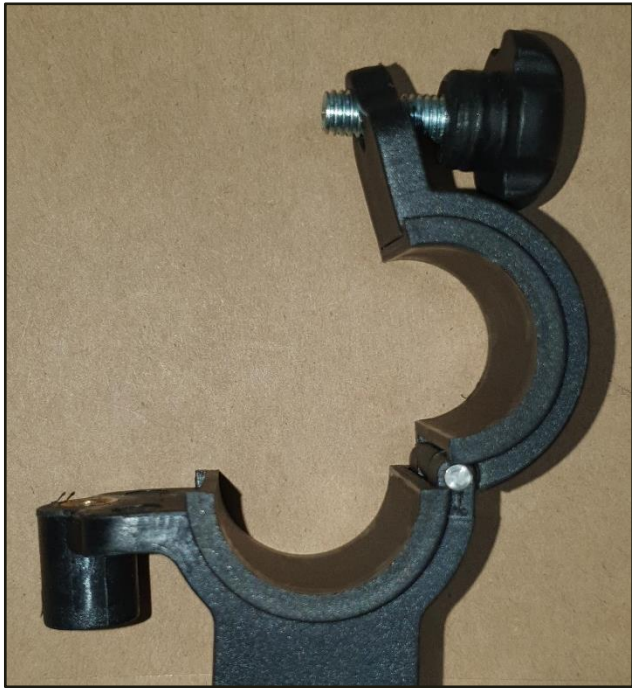
Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
1.		<p>Inhalt: Scope of delivery:</p> <p>1x Stockhalter für 2 Gehstöcke: 1x cane holder for 2 canes:</p> <p>1x Stockhalter 1x cane holder</p> <p>4x Distanzschale 4x distance half tubes</p> <p>1x Haltegurt 1x strap</p> <p>1x Halter für Stockhalter 1x cane holder bracket</p> <p>1x Zylinderschraube 1x Allen cheese head screw M8x50mm</p> <p>1x Innensechskant M8x50mm 1x Lock nut M8</p> <p>1x Stopmmutter M8 2x Washer 8mm</p> <p>2x Unterlegscheibe 8mm</p>
2.		<p>Halter für Stockhalter kann wahlweise aussen oder innen am Vierkantrohr des Sitzes angebracht werden.</p> <p>The bracket can be mounted either on the outer or the inner side of the seat's profile.</p>

Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
3.		<p>Vor dem Schraubenkopf und der Stoppmutter jeweils eine Unterlegscheibe einsetzen.</p> <p>Washers need to be placed before the screw head and the lock nut.</p>
4.		<p>Halter für Stockhalter durch das Anziehen der Zylinderschraube fixieren.</p> <p>The bracket to be fixed by tightening the cheese head screw.</p>



Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
5.		<p>Die Feststellschraube zwischen der Führung und dem Stockhalter anziehen.</p> <p>Tighten the fixing screw between the clamp and the cane holder.</p>
6.		<p>Die zwei kleineren Distanzschalen in die Führung des Stockhalters einsetzen.</p> <p>Place 2 distance half tubes in the clamp.</p>

Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
7.		<p>Den Stockhalter an die zuvor angebrachte Halterung anbringen. Dazu die Spannvorrichtung um die Halterung legen, festspannen und anschrauben.</p> <p>Mount the cane holder on the bracket. Press the clamp shells together and tighten the screw.</p>
8.		<p>Die Halterung in die gewünschte Position bringen.</p> <p>Rotate the cane holder to the wished position.</p>

Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
9.		<p>Den Haltegurt an der Kopfstütze anbringen.</p> <p>Mount the strap on the headrest.</p>
10.		<p>Bis zu zwei Gehstöcke in die Halterung stellen und den Haltegurt festziehen.</p> <p>Place up to two canes in the cane holder and tighten the strap.</p>

Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
11.		<p>Wenn zusätzlich zum Stockhalter ein Halter für Zubehör montiert ist, muss die Halterung für den Stockhalter innen am Vierkantrohr montiert werden.</p> <p>If a accessories bracket is mounted as well to the seat, the cane holder bracket must be mounted on the inner side of the seat's profile.</p>
12.		<p>Den Halter für den Stockhalter zusammen mit dem Halter für Zubehör am Vierkantrohr festschrauben.</p> <p>The cheese head screw should hold both the cane holder and the accessories' bracket.</p>

Montageanleitung Stockhalter universal.  
Assembly instructions for cane holder universal.

Pos.		Beschreibung / Description
13.		<p>Stockhalter an die Halterung anbringen und in die gewünschte Position bringen.</p> <p>Mount the cane holder on the bracket and rotate it in the wished posion.</p>
		